

HorseMonitoring

... Quick Start:

HorseMonitoring ist netzunabhängig und hat eine Betriebsdauer von 72 Stunden. Der Kunde benötigt eine SIM-Karte, die durch seitliches Öffnen des Gehäuses in den SIM-Kartenhalter eingelegt wird.

Gerät einschalten und die PIN der SIM-Karte eingeben. Anschließend erfolgt die Eingabe der Rufnummer, die im Alarmfall angerufen werden soll. Zusätzlich kann eine 2. Rufnummer zur Alarmierung hinterlegt werden.

Nach dem Start erfolgt der Selbsttest und ein Anruf zum berechtigten Handy. Funktionsfehler werden am Display angezeigt. Im Betriebszustand zeigt das Display die Herzfrequenz des Pferdes.



HorseMonitoring

Powered by MTK Messtechnik Hamburg (GmbH & Co.) KG

Lieferumfang

- ■ ■ HorseMonitoring bestehend aus einem Aluminiumgehäuse mit Schnittstelle, LC-Display und Tastatur
- ■ ■ Ladeschale zur Aufbewahrung des Grundgerätes und zum Laden des Lithium-Ionen Akkus
- ■ ■ Brustgurt mit Tasche
- ■ ■ 2-teiliger Bauchgurt
- ■ ■ 1 Flasche Ultraschallgel
- ■ ■ Tragetasche

Technische Daten:

Nylon-Tasche mit Brust-Halsgurt und integriertem Feuchtesensor
HorseMonitoring Abmessungen: 125x181x42 mm
Schutzart: IP53
Display, 4-zeilig, beleuchtet
Alphanumerische Tastatur mit 5 Funktionstasten
Integriertes Dual-Band GSM 900/1800 MHz
Lithium-Ionen Akku, 3,7 V
Gewicht: ca. 430 g
Ladestation mit Netzteil 230 V/50 Hz
Umgebungsbedingungen bei Betrieb:
-10°C bis +40°C max. 90% rel. Feuchte
Lagerbedingungen:
-20°C bis +55°C nicht kondensierend

MTK Messtechnik Hamburg (GmbH & Co.) KG

Kanalplatz 8 · D-21079 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 / 77 13 12
Fax: +49 (0) 40 / 77 13 13
info@horsemonitoring.de
www.horsemonitoring.de



Tiermedizinisches
Beobachtungs-Meßsystem

Mobiles Alarmierungsgerät
mit integriertem
GSM-Modul

Einsatz bei Pferden mit
Geburtsvorgängen
Heilungsprozessen
und Koliken

